

Turniket EPFT taktické škrtidlo B96

NÁVOD K POUŽITÍ



UPOZORNĚNÍ: PŘI APLIKACI V SOULADU S NÁVODEM JE POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ PRO ZÁCHRANU PŘED ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM VYKRVÁCENÍM. POKUD SI NEJSTE JISTI, NEBO NEMÁTE ČAS NA PROZKOUMÁNÍ MÍSTA ODKUD ČLOVĚK KRVÁČÍ, TAK LZE TURNIKET POUŽÍT I PŘES OBLEČENÍ, CO NEJVÝŠE K RAMENU NEBO KYČLI. TURNIKET NESMÍ BÝT POUŽIT PŘES TVRDÉ ČÁSTI V OBLEČENÍ.



1. APLIKUJTE TURNIKET PROXIMÁLNĚ, CO NEJBLIŽE K TRUPU, NA KRVÁČEJÍCÍ KONČETINU A PROVLEČTE PÁS POPRUHOVOU SPONOU



2. PROVLEČTE PÁSEK SKRZ POPRUHOVOU SPONU A PEVNĚ JEJ UTÁHNĚTE NAZPĚT



3. PŘIDRŽTE PÁSEK OKOLO KONČETINY



4. OTÁČEJTE VRATIDLEM. KONTROLUJTE KONČETINU, POKUD KRVÁCENÍ NEPŘESTÁVÁ, PŘIDEJTE OTOČKU VRATIDLA PRO ZVÝŠENÍ OBVODOVÉHO TLAKU.



5. VRATIDLO UPEVNĚTE DO POJÍSTNÉHO BILATERÁLNÍHO MOSTU



6. PŘIDRŽTE PÁSEK NAD VRATIDLEM. V PŘÍPADĚ MENŠÍCH KONČETIN POKRAČUJTE S OMOTÁVÁNÍM PÁSKU OKOLO KONČETINY A NAD VRATIDLEM.

VAROVÁNÍ: PŘEČTĚTE SI PROSÍM CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ. NEVHODNÉ POUŽITÍ MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU PORANĚNÍ.



7. ZAJIŠTĚTE VRATIDLO A PÁSEK POJÍSTNÝM BÍLÝM PÁSKEM A ZAZNAMENEJTE ČAS APLIKACE TURNIKETU